
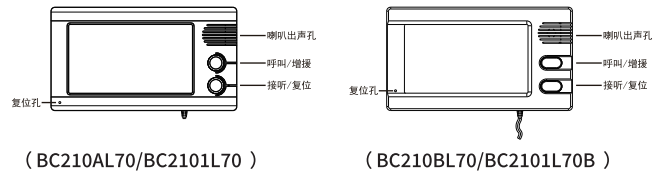
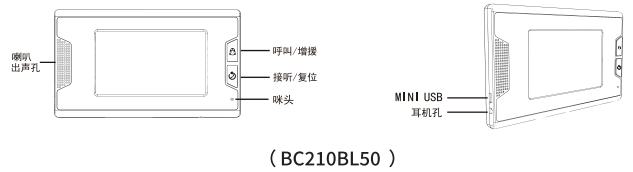
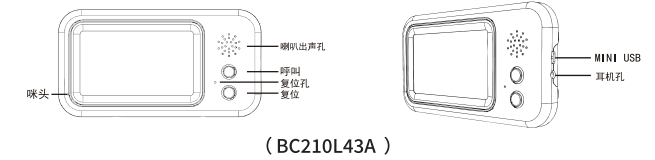


# V32-V33系列二线病床分机 使用手册

装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)


序号	名称	数量	
1	病床分机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装, 内含: 挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同, 以实物为准。

## 一、产品简介

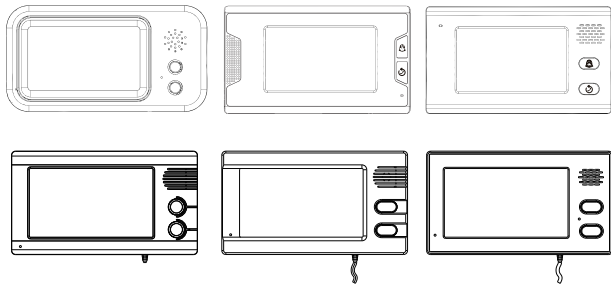

欢迎选用我公司的病床分机产品!

BC210L43A/BC210BL50/BC210L50/BC210AL70/BC2101L70/BC210BL70/BC2101L70B/BC210CL70/BC2101L70C用当今最先进的电子通信技术设计, 以优良的SMT工艺生产, 经过严格的质量保证体系的测试与检验, 具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点, 为值得信赖的病房分机产品。

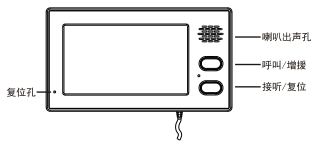

## 二、号码设置



进入病房号设置功能, 正确输入该病房门口机的号码, 按确认键系统提示设置成功并自动重启。

如果输入号码不在房号表中, 则系统显示“号码不存在”; 如果号码没改变, 则系统显示“设备号码无修改!”。

温馨提示: 房号要根据房号表填写, 每台病房门口机设备都会分配一个固定IP, 且设备IP都不相同, 设置正确的房号后系统将自动更改设备IP地址。

## 三、安装说明



### BC210L43A病床分机安装说明

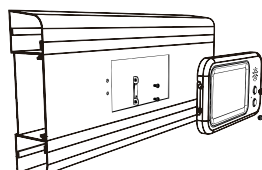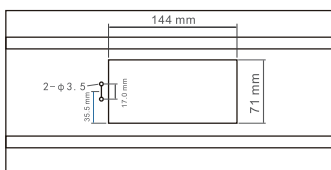

### 一、设备带开孔

1. 按照以上图纸尺寸在设备带上开孔。

### BC210BL50/BC210L50病床分机安装说明

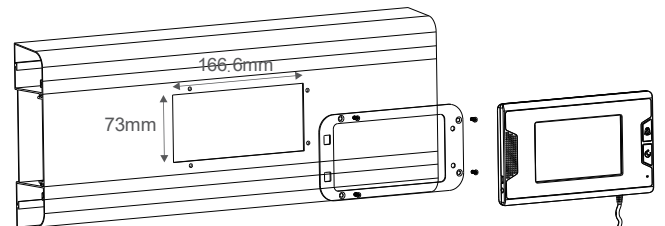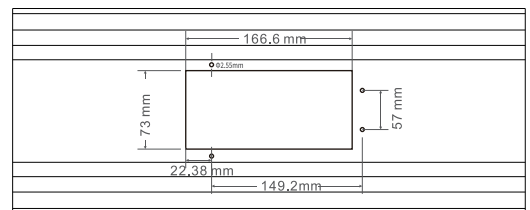



### 一、设备带开孔

按上图尺寸开一个166.6mm\*73mm的长方形槽, 按上图尺寸钻4个直径2.5mm的孔, 4个直径2.5mm的设备带上钻孔, 能保证3mm沉头自攻螺丝头锁入设备带并能锁紧。

### 二、安装病床分机

1. 将挂板用4颗螺丝固定在设备带上。  
2. 将设备后盖对准挂板后扣在挂板上即可。

BC210AL70/BC2101L70/BC210BL70/BC2101L70B/  
BC210CL70/BC2101L70C病房门口机安装说明

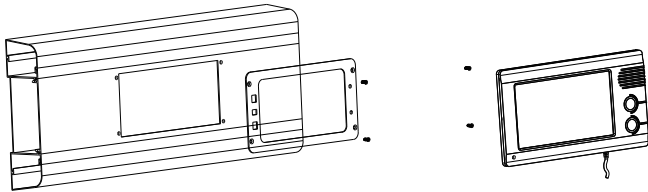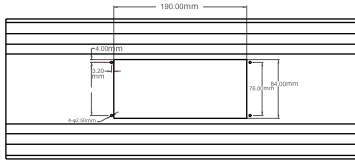


一、设备带开孔

1.按照图纸尺寸在设备带上开孔。


二、安装病床分机

- 1.将线槽的网线、电源线等功能线接口插到病床分机上。
- 2.将病床分机用4颗M3\*10盘头自攻螺丝固定在安装面板上。
- 3.将病床分机两边的装饰盖对准卡扣后扣在病床分机上，拆卸时需要用两个手指按压装饰盖的卡扣位然后向外推即可。
- 4.将病床分机的手柄固定铁片贴上背胶粘在设备带上。
- 5.将病床分机的手柄挂在铁片上即可安装完毕。


四、接口接线说明

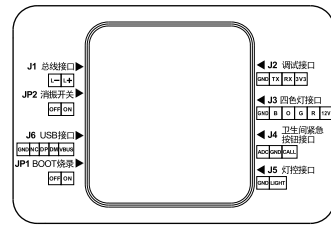

( BC210L43A )

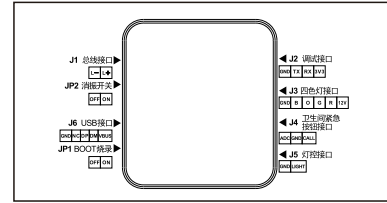

( BC210BL50/BC210L50 )

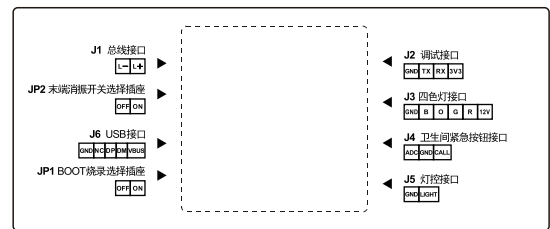

( BC210AL70/BC2101L70/BC210BL70/BC2101L70B/  
/BC210CL70/BC2101L70C )

五、技术参数

产品型号	BC210L43A	BC210BL50 BC210L50	BC210AL70/BC2101L70 BC210BL70/BC2101L70B BC210CL70/BC2101L70C
供电电压	DC48V	DC48V	DC48V
最大功耗	5W	5W	6W
工作温度	-10°C to 50°C	-10°C to 50°C	-10°C to 50°C
工作湿度	10% to 95%	10% to 95%	10% to 95%
联网接口	总线	总线	总线
安装方式	设备带安装	设备带安装	设备带安装
整机尺寸	170*90*19.5mm	190*110*14.5mm	230*128*20.5mm

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

六、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

简单故障排除表

序号	故障描述	原因分析	排除方法
1	屏幕无显示，触摸屏可点亮屏幕	设备进入待机状态或接错	通过护士站软件下发亮屏时间区间
2	设备时间不同步（不正确）	护士站软件没有打开正确	在护士站的电脑上打开护士站软件，并保持运行状态
3	数模系统无法接听病床呼叫	数模系统中无法接听当前病房下的病床分机发起的呼叫	换一个其它病房分机即可接听

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	